

ANIOS R444



Insumos Para Esterilización

Renovador del Instrumental de inox



- Elimina las manchas de óxido (pasivación)
- Suprime los depósitos minerales
- Utilización en remojo: sistema de dosificación incorporado


INDICACIONES

Producto especial para pulir los instrumentos de acero inoxidable y los dispositivos médicos. Elimina los restos proteicos, los depósitos de óxido de hierro y otras manchas de oxidación.

CARACTERÍSTICAS

- Solución líquida límpida.
- Densidad a 20°C: 1,360 +/- 0,005
- pH (producto diluido) a +20°C : aprox 1,25

PRODUCTO
PARA DILUIR
5ml/50 ml → 1 L

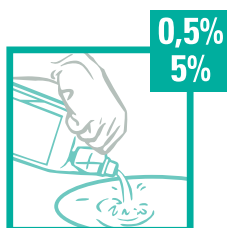

ANIOS R444

Renovador del Instrumental de inox.

MODO DE EMPLEO

Antes de utilizar el producto, protéjase adecuadamente: mascarilla, gafas y guantes)

Solución concentrada para uso profesional.

Utilización en remojo para diluir de 0.5 a 5 % en agua templada.

- Sumerja el instrumental.
- Tiempo de remojo: de 1 a 2 horas (controle el estado del instrumental cada 30 minutos).
- Extraiga el instrumental del baño cuando esté bien pulido.
- Enjuague abundantemente y seque.
- Renovar el baño de remojo al menos una vez al día.

PRECAUCIONES DE USO

Producto peligroso. Respétense las precauciones de empleo (Establecidas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos).

Almacenamiento: de +5°C a +35°C.

Dispositivo médico de clase I (Directiva 93/42/CEE modificada).

ACONDICIONAMIENTO

3 frascos de 1 L dosificador.....Réf. 0191.137



Insumos Para Esterilización

Av. Lope de Vega 1252
(1407) CABA- Buenos Aires- Argentina
Tél./Fax +54 011 4648-2261
www.ipeinsumos.com.ar

